


ThinPrep® Pap Test

Guía Rápida

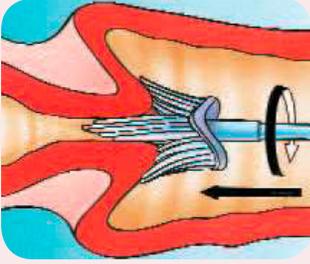

TOMA DE MUESTRA

Insertar las cerdas centrales largas del cepillo recolector en el canal endocervical, lo suficientemente profundo como para permitir el contacto de las cerdas más cortas con el ectocérvix. Presionar cuidadosamente y rotar el cepillo en el sentido de las agujas del reloj un total de cinco veces.

Se recomienda tomar la muestra para GynTect® antes de la biopsia (si procede), siempre que ésta se realice en la misma consulta.



INTRODUCCIÓN DE LA MUESTRA EN EL VIAL

Introducir el cepillo lo más rápido posible en el vial con la solución PreservCyt®, presionándolo contra el fondo un total de diez veces, forzando la separación de las cerdas. Como paso final, hacer girar el cepillo enérgicamente para una mayor liberación del material. Desechar el dispositivo recolector.



CERRAR

Girar el tapón de vial hasta que quede completamente cerrado.



REGISTRAR

El kit de GynTect® contiene dos etiquetas y un consentimiento informado por muestra. Una de las etiquetas debe adherirse en el consentimiento informado y la otra, pegarse en el vial. Es importante asegurarse de que cada muestra y su correspondiente consentimiento informado lleven etiquetas con la misma codificación.



PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS Y AVISO PARA SU RECOGIDA

Conservar las muestras a temperatura ambiente hasta su recogida. Si se envía una sola muestra, introducir el vial con el correspondiente consentimiento informado en la bolsa que se encuentra en el interior del kit. Cuando se envíe la segunda muestra (o cuando se envíen las dos simultáneamente), ésta se recogerá directamente en el interior del kit.

Para su recogida, contactar con NIMGenetics vía correo electrónico: mensajeria@nimgenetics.com o por teléfono (+34 91 037 83 54, ext 3016) antes de las 16:00 horas, para que la muestra pueda ser recogida el mismo día.